

### Hibakód kiolvasása (naplófájl) a Medela Thopaz+ készülékből

1. **kapcsolja be** a készüléket,
2. a kijelzőn megjelenik az "Új beteg?" Válassza ki: **Nem**, ilyenkor a készülék készenléti üzemmódban van,
3. **nyomja meg egyszerre a**  $\triangle$  és  $\nabla$  billentyűket, és megjelenik a naplófájl,
4. most a  $\triangle$  és  $\nabla$  billentyűkkel görgethet a naplófájlban.

***Kérjük, vegye figyelembe:***

*A készülék különbséget tesz figyelmeztetések, riasztások és hibák között. Figyelmeztetések és riasztások kezelési problémát jeleznek. A belső hiba hibás modulra utal.*

Hibakódok:

<b>1xx</b>	Belső hiba (a készülék javításra szorul, keresse fel a szervizt)
<b>2xx</b>	Belső hiba (a készülék javításra szorul, keresse fel a szervizt)
<b>3xx</b>	Riasztás (kezelési probléma, ellenőrizze a használati leírást)
<b>4xx</b>	Figyelmeztetés (kezelési probléma, ellenőrizze a használati leírást)
<b>5xx</b>	Események (nincs szükség intézkedésre)
<b>9xx</b>	Szöveges üzenetek (nincs szükség intézkedésre)

<b>IE</b>	belső hiba
<b>WA</b>	figyelmeztetés
<b>AL</b>	riasztás

**Megjegyzés:**

*A ThopEasy+ szoftverrel nem lehet kiolvasni a készülék naplófájlját, ez a szoftver csak a terápiás adatok megjelenítésére szolgál.*

Bízunk benne, hogy ez segíti Önt a munkájában!

Univill Kft.